

Guide d'entretien Syndeo®



À LA FIN DE CHAQUE SOIN



S'assurer que le capuchon de nettoyage soit fixé sur la pièce à main.



Effectuer un nettoyage du système pendant 60 secondes.



Vider le Gunkie.



Rincer le Gunkie avec de l'eau.

À LA FIN DE CHAQUE JOURNÉE



S'assurer que le capuchon de nettoyage soit fixé sur la pièce à main.



Effectuer un nettoyage du système pendant 60 secondes.




Laver le Gunkie avec de l'eau et du savon.



Laisser sécher à l'air libre.


NETTOYAGE PIÈCE À MAIN – À LA FIN DE CHAQUE SEMAINE

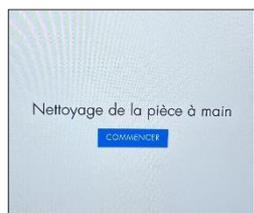

Sur l'écran, sélectionnez Rinçage du système puis sélectionner Rinçage de la pièce à main.



Nettoyer la pièce à main, les chambres à air et la tête en aluminium avec une lingette désinfectante.

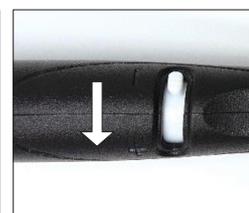

Ouvrir la vanne de débit sur le +.



Détacher les tubulures de la pièce à main en tournant doucement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Insérer la brosse de nettoyage dans l'orifice d'aspiration (le plus petit) situé sur la face de la pièce à main. Pousser la brosse complètement vers l'intérieur et l'extérieur tout en tournant 3 fois. Répéter l'opération dans le connecteur bleu.



Remettre les tubulures en place.




Fixer le capuchon de nettoyage.



Effectuer un nettoyage de 60 secondes.

Guide d'entretien Syndeo®

NETTOYAGE DU COLLECTEUR – 1 FOIS PAR SEMAINE

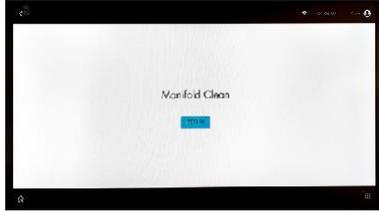

Sur l'écran, sélectionnez Rinçage du système puis sélectionner Nettoyage du collecteur.



Retirer les solutions.



Placer une serviette sous la tubulure pour recueillir le liquide.



Insérer le Rinse Away dans l'emplacement pour solution 1. Sélectionner continuer.




Lorsque le rinçage est terminé. Retirer la bouteille de solution de l'emplacement 1 et la raccorder à l'emplacement 2. Sélectionner continuer.



Lorsque le rinçage est terminé. Retirer la bouteille de solution de l'emplacement 2 et la raccorder à l'emplacement 3. Sélectionner continuer.



Replacer toutes les solutions et nettoyer le Gunkie.

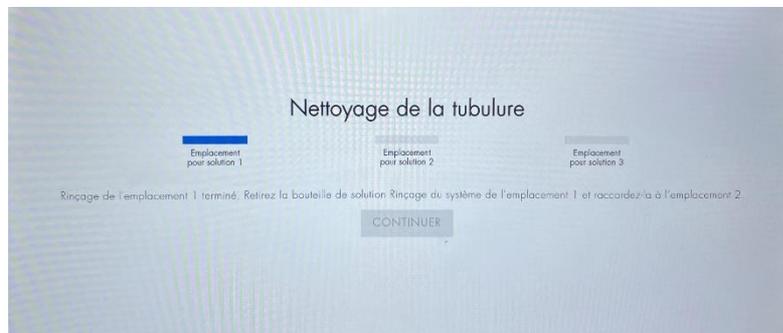

LED



POUR NETTOYER : essuyer légèrement avec un tissu humide puis sécher.

POUR DÉSINFECTER : débrancher l'appareil. Essuyer la surface de l'appareil avec une lingette désinfectante pendant au moins 30 secondes.



DRAINAGE LYMPHATIQUE



Nettoyer les cloches de drainage lymphatique avec une lingette désinfectante sur toute zone en contact avec la peau.



ÉCRAN TACTILE



Utiliser un produit de nettoyage pour verre et un chiffon ou une serviette en microfibras pour nettoyer l'écran tactile. Vaporiser sur le chiffon, pas directement sur l'écran.

